

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Sarıj Numarası:

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:

19.04.2018-2018/32

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü-Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu
<i>S. aureus</i>		
<i>P. aeruginosa</i>		
<i>Enterococcus hirae</i>		
<i>Candida albicans</i>		
<i>Aspergillus brasiliensis</i>	Yer ve yüzey dezenfeksiyonu	% 2
<i>M. avium</i>		
<i>M. terre</i>		
<i>Adenovirus</i>		
<i>Poliyovirus</i>		
<i>Murine norovirus</i>		

Kullanma şekli: Dezenfektan aktif madde olan perasetik asit toz içerisindeki aktif maddelerin su ile reaksiyonu sonucu uygulama çözeltisinde oluşmaktadır. Çözelti temizlik ve dezenfeksiyon amacı ile kullanılan kaplarda hazırlanır. % 2 konsantrasyonda bir çözelti hazırlamak için, 160 gr ürünü 8 L su içerisinde boşaltınız. Çözeltiyi birkaç defa karıştırınız. 15 dakika sonra çözelti kullanıma hazırdır. Hazırlanan çözelti 1 çalışma günü (8 saat) kullanılır. Gerektiği yüzeyleri bu çözelti ile tamamen ıslatarak siliniz. Tüm tıbbi yüzeylerde, özellikle yoğun bakım üniteleri veya antibiyotiklerin sıklıkla uygulandığı riskli ve hassas alanlarda kullanılabilen Incidin® Active, temizlik yapabilmeye özelliğine de sahiptir.

Üretici firmasının adı ve adresi:

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab Allee 1 40789 Monheim am Rhein Almanya

Ruhsat sahibinin adı ve adresi:

Ecolab Temizleme Sistemleri Ltd. Şti.
Esentepe mah Esentepe Cevizli E5 Yanyol Cad Vizyon Bulvarı
No:13/65 Kat:1 34870 Kartal İstanbul
Tel: 0216 458 69 00 Faks: 0216 458 69 04
www.ecolab.com.tr

Net miktarı: 160 g, 1,5 kg

Ambalajı açılmış ürünü kapagü sıkıca halde, uygun depolama şartlarında son kullanma tarihine kadar kullanınız. Ürünün normal depolama koşullarında raf ömrü 2 yıldır.

KULLANICI GRUBU: Uzman Personel

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ VE PROSEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ

ECOLAB®

Ecolab Temizleme Sistemleri Ltd. Şti.

INCIDIN® ACTIVE

Medikal alanlar için Yer ve Yüzey Dezenfeksiyon Ürünü

Formülasyon şekli: Toz

Aktif madde ve miktarı (% a/a):

Dezenfektan aktif madde olan Perasetik asit, toz içerisindeki aktif maddelerin su ile reaksiyonu sonucu uygulama çözeltisinde oluşmaktadır. % 2 konsantrasyonda hazırlanmış uygulama çözeltisi: minimum %0,2 Perasetik asit (=2000ppm) içerir. (Cas No:79-21-0)

Yardımcı madde ve miktarı (% a/a):

pH düzenleyici: % 24,9; Sürtükten: % 3; Korozyon inhibitörü: % 1,5; Çözücü: % 3,658; Sekuesterizasyon ajanı: % 0,842; Parfüm: % 0,05

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: Usulüne uygun olarak imha ediniz.

ÜRÜN TİPİ : 2 Medikal alanlarda kullanılan yer ve yüzey

dezenfektanı

Zehirlenme Belirtileri:

Gözle temas: Gözleri ciddi tahriş riski mevcuttur.

LD 50 değerleri:

Sodyum Perkarbonat LD50 (oral/sıçan) : 1,034 mg/kg

Sitrik asit LD50 (oral/sıçan) : 11,700 mg/kg

Sodyum karbonat LD50 (oral/sıçan) : 2800 mg/kg

Çözücüler/katkı maddeleri LD50 (oral/sıçan) : 735 mg/kg

İlk Yardım Önlemleri:

Teneffüs etme: Maruz kalmış kişiyi açık havaya çıkarınız.

Semptomatik tedavi uygulayınız. Semptomlar meydana gelirse, tıbbi yardım alınır. **Yutma:** Ağzı su ile çalkalayınız. Semptomlar meydana gelirse, tıbbi yardım alınır. **Çiltle temas:** Bol miktarda su ile yıkayınız.

Gözle temas: En az 15 dakika, göz kapaklarının içi de dahil derhal bol suyla yıkayınız. Kontakt lens varsa ve çıkartması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. Hemen tıbbi yardım alınır.

Özel Antidotu:

Yoktur.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar

Sadece orijinal, uygun etiketli kabında, çocukların erişemeyeceği şekilde, ağzı iyice kapalı tutunuz. 0°C ile 25 °C arasında saklayınız.

Arlar için zehirlidir.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ZARARLILIK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

ÖNLEM İBARESİ VE AÇIKLAMASI

Önlem:

P280: Göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Müdahale:

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P310: Hemen bir ZEHİR MERKEZİNİ/doktoru/arıyın.

Tehlike



BAKANLIK ONAYI



ECOLAB TEMİZLEME SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.

Esentepe Mah. Cevizli E-5 Yanyol Cad. E-5 Yanyol Çkd.

Vizyon Bulvarı No: 13/65 Kat: 1 34870 Kartal/İST.

Merkez No: 0216 458 69 00

Yenikapı V.D: 0216 458 69 00

www.ecolab.com.tr

Yeni Kapı V.D: 0216 458 69 00

www.ecolab.com.tr

Yeni Kapı V.D: 0216 458 69 00

www.ecolab.com.tr