

## Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şarj numarası:

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü-Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
S.aureus ATCC 6538, P.aeruginosa ATCC 15442, E.hirac ATCC 10541	Hastanelerdeki tüm yatay ve dikey yüzeylerin; özellikle PVC ve epoksi alanların yerlerin, duvarların, yoğun bakım odalarının, ameliyathanelerin ve diğer tüm alanlar ile demirbaş eşyaların	4 ml ürünü 100 ml suya veya 200 ml ürünü 5000 ml suya ilave edip kullanınız.	Gerektiğinde
C.albicans ATCC 10231; Aspergillus brasiliensis ATCC 16404			5 dakika
Poliovirus Type 1, LSc-2ab** , Adenovirus Type 5, strain Adenoid 75, ATCC VR-5; Murine norovirus, strain S99 Berlin			
M.avium ATCC 15769, M.terra ATCC 15755	dezenfeksiyonu için kullanılır.		60 dakika

## Kullanma Alanı:

KONIX AF YD-1 Hızlı dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan her yerde kullanılır.

Ameliyathane, masa, lamba ve demirbaşları, asma araçları, acil yardım otoları, sedye ve ambulanslar, diş hekimliği cihaz ve aletleri, frez uçları, aletler, başlıklar vs., hemşire deskları, masa ve sandalyeler, Panaman arabaları, doktor ve diş doktorlarının muayenehanelerinde hızlı dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan alanlar, hastabaşı monitörleri, sıklıkla el ve cilt temasının olduğu alanlar, klozet, lavabo, musluk, kapı kolu vb.

Hasta bakım ünitelerindeki bairo malzemeleri, serum askısı, hasta yatağı kenarları, mikroskopların el ve cilt teması olan alanlarında, hasta eldi ile temas eden tıbbi aletler; stetoskop, dercece, tansiyon aleti, otoskop, oftalmoskop gibi.

## Kullanma Şekli:

1-) Temiz bir kova içine suyu, ille doldürülür. Kaba konan her 5 lt su için 200 ml KONIX AF YD-1 eklenir. Dönlama gerçekleştirmez kurunaya bırakılır. KONIX AF YD-1 solüsyon sulandırıldıktan sonra sadece 1 kez kullanılır. Her defasında solüsyonun yenisi ile değıştirilmesi gerekir.

## Üretici ve Ruhsat Sahibi Firmasının Adı ve Adresi:

Turkuaz Sağlık Hiz. Med.Tem. Kim. Ür. San. ve Tic. A.Ş.  
Yakuplu Mah. - Birlik caddesi. No:32/1 Beylikdüzü / İstanbul  
Türkiye  
T +90 212 428 68 48 - F +90 212 428 68 53  
info@turkuazsaglik.com.tr - www.turkuazsaglik.com.tr

**Net miktarı:** 5 ml., 10 ml., 30 ml., 50 ml., 100 ml., 150 ml., 200 ml., 250 ml

300 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml, 5000 ml, 30000 ml

Ambalajı açılmış ürünü 6 ay içerisinde kullanınız.

Ürünün serin ve kuru koşullarda raf ömrü 2 yıldır.

## KULLANICI GRUBU

UZMAN PERSONEL

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ VE PROSPEKTÜSÜNÜ

MUTLAKA OKUYUNUZ

FİRMA ADI VE AMBLEMİ

Turkuaz Sağlık Hiz. Med.Tem. Kim. Ür. San. ve Tic. A.Ş.

turkuaz

BIYOSİDAL ÜRÜNÜN TİCARİ ADI

## Konix Af YD-1 Konsantr Aldehitsiz Ekipman ve Yüzey Dezenfektanı

### SIVI

**SIVI Aktif maddenin adı ve miktarı (%)**

% 30 Propan-2-ol Cas no:67-63-0

% 10 Didecyl dimethyl ammonium chloride (% 80),

Cas no:7173-51-5

% 2 Benzalkonium chloride (% 50) Cas no: 68424-85-1

**Yardımcı maddeler ve miktarları (%)**

% 0,2 Korozyon İnhibitörü,

Ve % 57,8 su ile 100'e tamamlanır

İnhibitörü,

ve Su ile % 100'e tamamlanır

**ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN**

**YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.**

**BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.**

**UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA**

**MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.**

**UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA**

**HİÇBİR ŞEY YEMEMİNİZ, İÇMEMİNİZ, SİGARAYA KULLANMAYINIZ.**

**İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ**

**ÖNLEM EKİN, KULLANIM TALİMATINA**

**UYUNUZ.**

Boş ambalaj imha şekli: Kullanılan ürünün ambalajı temizlendikten sonra geri dönüşüme gönderilmelidir. Hiçbir şekilde doğaya atılmamalıdır. Usulüne uygun olarak imha ediniz.

Mesul Müdür



**TURKUAZ SAĞLIK HİZMETLERİ MEDİKAL**  
**TEMİZLİK KİMYASAL ÜRÜNLER SAN VE TİC.A.Ş.**  
Yakuplu Mah. Birlik Cad. No:32/1 İc Kapı No:1  
Beylikdüzü / İSTANBUL

Tel:+90 212 428 68 48 - F: +90 212 428 68 53

Yeni Kapı V.D: 871 065 40 10

Tic.Sic. No:450636

## ÜRÜN TİPİ ( 2 )

Zehirlenme belirtileri.

## LD<sub>50</sub> değerleri:

**Propan-2-ol Cas no:67-63-0:5045 mg/kg**

**Didecyl dimethyl ammonium chloride(DDAC) Cas no:7173-51-5:645 mg/kg**

**İlk yardım önlemleri**

## Genel Bilgiler

Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mutimkinse etiketi gösterin).

## Solunma:

Kişiyi temiz havaya çıkartın ve rahat nefes almasını sağlayın.

## Yutma :

Kendinizi iyi hissetmezseniz, ulusal zehir danışma merkezinin 114 nolu telefonunu veya doktoru/hekimini arayın.Ciltte Temas

Cildinizi su/düğüle durulayın. Kirli tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkarm.

## Gözlerle Temas :

Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarm. Sürekli durulayın. Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

## Antidotu ve gerekli bilgiler:

Ürünün antidodu yoktur,sempomatik tedavi uygulanır.

## Arlar için zehirlidir.

**Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirlidir olabilir.**

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ**

**(UZEM)'İN 114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ**

**ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

**Güvenli elleçleme için önlemler:**

Çalışma alanında iyi havalandırma sağlanyın. Isıdan, kıvılcımdan, ateşten, sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez. Kabi ve altçı ekipmanı toprağa oturtun/bağlayın. Sadece ateş almayan aletler kullanın. Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın. Konteynir içinde, alev alabilen gazlar birikebilir. Patlamaya karşı dayanıklı ekipman kullanın. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Cilt ve gözlerle temasından kaçının.

## Hijyen ölçütleri:

Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Ürünü elleçledikten sonra daima ellerinizi yıkayın.

## Teknik tedbirler:

Kabi ve altçı ekipmanı toprağa oturtun/bağlayın.

## Saklama koşulları:

Kabi sıkıca kapalı ve kuru tutun. Serin, iyi havalandırılmalı bir yerde, uyumsuz maddelerden uzakta saklayın. Isıdan, kıvılcımdan, ateşten, sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.

## Zararlılık İfadeleri ve Açıklamaları

H225 - Koby alevlenir sıvı ve buhar

H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar

**Önem İfadeleri ve Açıklamaları**

P233 - Kabi sıkıca kapalı tutun

P240 - Kabi ve altçı ekipmanı toprağa oturtun/bağlayın

P241 - Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucul... malzeme kullanın

P264 - Elleçlemeden sonra ellerinizi su ile iyice yıkayın

P280 - Göz koruyucu donanım, koruyucu eldiven kullanın

P305+P351+P338 - GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.

Takılı ve yapışması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin

P337+P313 - Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın

P370+P378 - Yangın durumunda: Söndürme için ABC tozu, alkolle karşı dayanıklı köpük, karbondioksit (CO2) kullanın

P403+P235 - İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun

P501 - İçerdiği/kabi yerel, bölgesel, ulusal ve veya uluslararası düzenlemelere uygun olarak tehlikeli ve özel atıkları toplama merkezinde bertaraf edin



Bakanlık Onayı:



17-10-2018

Dikkat Alevlenebilir