

#### Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:

Şaşı numarası:

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
S.aureus ATCC 6538, P.aeruginosa ATCC 15442, E.hirae ATCC 10541	Hastanelerdeki tüm yatay ve dikey yüzeylerde püskürtme ve silme	Direkt Kullanım	Gerektiğinde
C.albicans ATCC 10231; Aspergillus brasiliensis ATCC 16404			5 dakika
Poliovirus Type 1, LSc-2ab**, Adenovirus Type 5, strain Adenoid 75, ATCC VR-5; Murine norovirus, strain S99 Berlin			60 Dakika
M.avium ATCC 15769, M.terrae ATCC 15755			

#### Kullanım Alanı:

Hızlı dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan her yerde kullanılır:

Ameliyathane masa,lamba ve demirbaşları,

Taşıma araçları;acil yardım otoları, sedyeler ve ambulanslar,

Dış hekimliği cihaz ve aletleri; frez uçları, aere-tör başlıkları vs.,

Hemşire deskları, masa ve sandalyeler,Pansuman arabaları,

Doktor ve diş doktorlarının muayenehanelerinde hızlı

dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan alanlar,

Hastabaşı monitörler,

Sıklıkla el ve cilt temasının olduğu alanlar; klozet, lavabo,

musluk, kapı kolu vb.,

Hasta bakım ünitelerindeki büro malzemeleri,

Serum askısı, hasta yatağı kenarları,

Mikroskopların el ve cilt teması olan alanlarında,

Hasta cildi ile temas eden tıbbi aletler; stetoskop, derece,

tansiyon aleti, otoskop, oftalmoskop gibi..

**Kullanma şekli:**

30 cm. mesafeden yüzey ve nesnelere tamamını kaplayıncaya

kadar püskürtünüz. Etki etmesi için etki süresince bekleyiniz.

Kuru ve temiz bir bez yardımıyla tek hareketle uzaktan yakına

temizden kirliye doğru siliniz.

Üretici ve Ruhsat Sahibi Firmamızın Adı ve Adresi:

Turkuaz Sağlık Hiz. Med.Tem. Kim. Ür. San. ve Tic. A.Ş.

Yakuplu Mah. - Birlik caddesi. No:32/1 Beylikdüzü / İstanbul

Türkiye

T +90 212 428 68 48 - F +90 212 428 68 53

info@turkuazsaaglik.com.tr - www.turkuazsaaglik.com.tr

Net miktarı: 5 ml.,10 ml.,30 ml.,50 ml.,100 ml.,150 ml.,200 ml.,250 ml

300 ml.,500 ml.,750 ml.,1000 ml.,5000 ml.,30000 ml

Ambalajı açılmış ürünü 6 ay içerisinde kullanınız.

Ürünün serin ve kuru koşullarda raf ömrü 2 yıldır.

#### KULLANICI GRUBU

UZMAN PERSONEL

#### KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ VE PROSPEKTÜSÜNÜ

MUTLAKA OKUYUNUZ

FİRMA ADI VE AMBLEMİ

Turkuaz Sağlık Hiz. Med.Tem. Kim. Ür. San. ve Tic. A.Ş.



#### BIYOSİDAL ÜRÜNÜN TİCARİ ADI

#### Konix Af Yer ve Yüzey Dezenfektanı

SIVI

Aktif maddenin adı ve miktarı (%)

% 50 Etilanol Cas no:64-17-5

% 10 Propan-2-ol Cas no:67-63-0

% 0,25 ( Didecildimethylammonium chloride (%80)

Cas no:7173-51-5

Yardımcı maddeler ve miktarları (%)

% 2 temizleyici ve Su ile % 100 e tamamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN

YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ

ÖNLEMELERİ İÇİN, KULLANIM TALİMATINA

UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: Kullanılan ürünün ambalajı temizlendikten

sonra geri dönüşüme gönderilmelidir. Hiçbir şekilde doğaya

atılmamalıdır. Usulüne uygun olarak imha ediniz.

TURKUAZ SAĞLIK ÜRÜNLERİ MEDİKAL

TEMİZLİK KİMYASAL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.A.Ş

Yakuplu Mah. Birlik Caddesi No:32/1 Beylikdüzü / İstanbul

Beylikdüzü / İstanbul

Tel: +90 212 428 68 48 / Fx: +90 212 428 68 53

İletişim: +90 212 428 68 48 / Fx: +90 212 428 68 53

Tic. Sic. No: 450836

#### ÜRÜN TİPİ ( 2 )

Zehirlenme belirtileri.

Mide bulantısı,aşırı maruziyette kusma ve ishal görülebilir.

LD<sub>50</sub> değerleri:

Etilanol Cas no :64-17-5:10470 mg/kg

Propan-2-ol Cas no :67-63-0:5045 mg/kg

Didecildimethylammonium chloride(DDAC) Cas no:7173-51-5:645

mg/kg

#### İlk yardım önlemleri

#### Genel Bilgiler

Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin

(mümkünse etiketi gösterin).

#### Soluma

Kişiyi temiz havaya çıkartın ve rahat nefes almasını sağlayın.

#### Yutma

Kendinizi iyi hissetmezseniz, ulusal zehir danışma merkezinin 114 no.lu telefonunu

veya doktoru/bekimi arayın

**Çiltle Temas :** Cildinizi su/duş ile durulayın. Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen

kaldırın/çıkarın.

**Gözlerle Temas:** Suyla birkaç dakika durulayın. Kontak lens varsa ve çıkarmaya

kolaysa çıkarın. Sürekli durulayın. Göz tahrişi kalıcı ise :tıbbi yardım/bakım alın.

#### Antidotu ve gerekli bilgiler

Ürünün antidotu yoktur,septomatik tedavi uygulanır.

**Arlar için zehirlerdir.**

**Balkılara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.**

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ**

**(UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

**ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

**Güvenli elleçleme için önlemler:**

Çalışma alanında iyi havalandırma sağlayın. Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak

yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez. Kabi ve altı ekipmanı toprağa

oturun/bağlayın. Sadece ateş almayan aletler kullanın. Statik boşalmaya karşı

önleyici tedbirler alın. Konteynir içinde, alev alabilen gazlar birikebilir. Patlamaya

karşı dayanıklı ekipman kullanın. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Cilt ve

gözlerle temasından kaçınınız.

#### Hijyen ölçütleri:

Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. Ürünü

elleçledikten sonra daima ellerinizi yıkayın.

#### Teknik tedbirler:

Kabi ve altı ekipmanı toprağa oturtun/bağlayın.

#### Saklama koşulları:

Kabi sıkıca kapalı ve kuru tutun. Serin, iyi havalandırılmalı bir yerde, uyumsuz

maddelerden uzakta saklayın. Isıdan, kıvılcımdan, alevden, steak yüzeylerden uzak

tutun. – Sigara içilmez.

#### Zararlılık İfadeleri ve Açıklamaları

H225 - Kolay alevlenir sıvı ve buhar

H319 - Cildi göz tahrişine yol açar

#### Önemli İfadeleri ve Açıklamaları

P233 - Kabi sıkıca kapalı tutun

P240 - Kabi ve altı ekipmanı toprağa oturtun/bağlayın

P241 - Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu/... malzeme kullanın

P264 - Elleçledikten sonra ellerinizi su ile iyice yıkayın

P280 - Göz koruyucu donanım, koruyucu eldiven kullanın

P305+P351+P338 - GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.

Takili ve yapışması kolaysa, kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin

P337+P313 - Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın

P370+P378 - Yangın durumunda: Söndürme için ABC tozu, alkolle karşı dıysanıklı köpük,

karbondioksit (CO2) kullanın

P403+P235 - İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun

P501 - İçeriği/kabı yerel, bölgesel, ulusal ve/veya uluslararası düzenlemelere uygun olarak,

tehtlikli ve özel atıklar toplama merkezinde bertaraf edin



Dikkat Alevlenebilir

Bakanlık Onayı

17 -10- 2018

